

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПОЛІДІОКСАНОН (ПДО) (Мепфіл-Д)

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛНИТ», Україна.

Опис

Шовний матеріал ПОЛІДІОКСАНОН (ПДО) (Мепфіл-Д) виробництва ГОЛНИТ – це монофіламентний матеріал, що розсмоктується, виготовлений із 100% ПОЛІДІОКСАНОНУ (ПДО). Шовний матеріал з гладкою поверхнею, синього кольору.

Дія

Проведені клінічні випробування ПОЛІДІОКСАНОНУ (ПДО) (Мепфіл-Д) показали, що матеріал викликає мінімальну реакцію тканин. Шовний матеріал ПОЛІДІОКСАНОН (ПДО) (Мепфіл-Д) зберігає 75% своєї початкової міцності за 14 днів після імплантації та 55% міцності за 42 дні. Повна абсорбція настає після 180-210 днів. Шовний матеріал ПОЛІДІОКСАНОН (ПДО) (Мепфіл-Д) не руйнується під дією тканинних ферментів і його якість не погіршується у випадку інфекції.

Застосування

Шовний матеріал ПОЛІДІОКСАНОН (ПДО) (Мепфіл-Д), що розсмоктується, придатний для використання у дитячій серцево-судинній хірургії, офтальмології та мікрохірургії. Особливо ефективний у випадках, коли є потреба у використанні матеріалу, що розсмоктується, і необхідна більш тривала (до 42-х днів) підтримка країв рани.

Протипоказання

Оскільки даний шовний матеріал розсмоктується, він не призначений для використання у тих випадках, якщо необхідно довготривале збереження міцності на розтягнення, наприклад, при імплантації серцевих клапанів та синтетичних імплантатів.

Попередження

Матеріал розроблений для одноразового використання. Повторно не стерилізувати. Повторна стерилізація матеріалу може призвести до втрати міцності нитки.

Заходи безпеки

Як і в роботі з іншими матеріалами, треба уникати пошкоджень під час експлуатації. Уникайте стискання матеріалу чи контакту з гострими інструментами. Для безпеки (надійності) вузла, використовується стандартна хірургічна техніка в'язання, як це передбачено хірургічними умовами, та ґрунтуючись на досвіді хірурга. При зав'язуванні вузла, кінці ниток натягуються в протилежних напрямках з однаковою силою.

УВАГА: натяг не повинен проводитись голкою, зтягуйте нитку, використовуючи пальці. Потрібно уникати ривків, які можуть пошкодити нитку чи відділити нитку від голки. Нерівномірний натяг нитки може призвести до створення небезпечного вузла. Для створення надійного вузла, необхідно зтягнути нитку у відповідності до техніки в'язання стандартних хірургічних вузлів.

Стерильність

Шовний матеріал ПОЛІДІОКСАНОН (ПДО) (Мепфіл-Д) виробництва ГОЛНИТ випускається в подвійній стерильній упаковці. Не використовувати матеріал, якщо упаковка має пошкодження. В запечатаному вигляді продукт залишається стерильним протягом терміну придатності, вказаному на упаковці.

Побічна дія

Не виявлена.

Правила зберігання

Шовний матеріал ПОЛІДІОКСАНОН (ПДО) (Мепфіл-Д) повинен зберігатися при температурі від 5°C до 40°C та вологості не більше 80%, в повітрі не повинно міститися ніяких агресивних домішок.

	Use By	Використати до
	Manufacture Date	Дата виготовлення
	Do Not Reuse	Не використовувати повторно
	Sterilized with ethylene oxide	Стерилізовано окисом етилену
	Temperature limitation	Температура зберігання
	Caution	Обережно
	Batch Code	Лот продукції
	Product Code	Код продукції
	Manufacturer	Виробник
	Reverse Cutting Needle	Зворотньо-ріжуча голка
	Cutting Needle	Ріжуча голка
	Spatula Needle	Шпательна голка
	Taper Point Needle	Колюча голка
	Tapercut Needle	Колюче-ріжуча голка
	Tapercut needle with a sharpening "diamond"	Колюче-ріжуча голка з заточкою «даймонд»



ТОВ «Голнит»

Харківське шосе, 48, 02160, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 296-19-82

+38 (044) 296-11-96

E-mail: info@golnit.com

www.golnit.ua



хірургічний
атравматичний
шовний матеріал

ГОЛНИТ®

Вироблено в Україні.