

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) РАПІД (Мепфіл-квік)

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛНИТ», Україна.

Опис

Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) РАПІД (Мепфіл-квік) виробництва ГОЛНИТ—це плетений з покриттям матеріал, що швидко розсмоктується, виготовлений із ПГА-ПОЛІГЛІКОЛІДУ, вкритого полікапролактоном і стеаратом кальцію. Шовний матеріал фіолетового та білого кольору.

Дія

Проведені клінічні випробування ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) РАПІД (Мепфіл-квік) показали, що матеріал викликає мінімальну реакцію тканин. Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) РАПІД (Мепфіл-квік) не руйнується під дією тканинних ферментів і його якість не погіршується у випадку інфекції.

Застосування

Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) РАПІД (Мепфіл-квік), що розсмоктується, придатний для використання у загальній, пластичній та косметичній хірургії, а також у гінекології та урології.

Протипоказання

У зв'язку з тим, що даний матеріал є таким, що розсмоктується, він не призначений для використання у тих випадках, де необхідне тривале збереження міцності на розтяг, наприклад, при імплантації серцевих клапанів чи синтетичних імплантатів. Також не призначений для випадків довгострокового загоєння ран. Цей матеріал протипоказаний для використання у серцево-судинній хірургії.

Попередження

Матеріал розроблений для одноразового використання. Повторно не стерилізувати. Повторна стерилізація матеріалу може призвести до втрати міцності нитки.

Заходи безпеки

Як і в роботі з іншими матеріалами, треба уникати пошкоджень під час експлуатації. Уникайте стискання матеріалу чи контакту з гострими інструментами.

Для безпеки (надійності) вузла, використовується стандартна хірургічна техніка в'язання, як це передбачено хірургічними умовами, та ґрунтуючись на досвіді хірурга. При зав'язуванні вузла, кінці ниток натягуються в протилежних напрямках з однаковою силою.

УВАГА: натяг не повинен проводитись голкою, затягуйте нитку, використовуючи пальці. Потрібно уникати ривків, які можуть пошкодити нитку чи відділити нитку від голки. Для створення надійного вузла, необхідно затягнути нитку у відповідності до техніки в'язання стандартних хірургічних вузлів.

Стерильність

Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) РАПІД (Мепфіл-квік), виробництва ГОЛНИТ випускається в подвійній стерильній упаковці. Не використовувати матеріал, якщо упаковка має пошкодження. В запечатаному вигляді продукт залишається стерильним протягом строку придатності, вказаному на упаковці.

Побічна дія

Не виявлена.

Правила зберігання

Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) РАПІД (Мепфіл-квік) повинен зберігатися при температурі від 5°C до 40°C та вологості не більше 80%, в повітрі не повинно міститися ніяких агресивних домішок.

	Use By	Використати до
	Manufacture Date	Дата виготовлення
	Do Not Reuse	Не використовувати повторно
	Sterilized with ethylene oxide	Стерилізовано окисом етилену
	Temperature limitation	Температура зберігання
	Caution	Обережно
	Batch Code	Лот продукції
	Product Code	Код продукції
	Manufacturer	Виробник
	Reverse Cutting Needle	Зворотньо-ріжуча голка
	Cutting Needle	Ріжуча голка
	Spatula Needle	Шпательна голка
	Taper Point Needle	Колюча голка
	Tapercut Needle	Колюче-ріжуча голка
	Tapercut needle with a sharpening "diamond"	Колюче-ріжуча голка з заточкою «даймонд»



ТОВ «Голнит»

Харківське шосе, 48, 02160, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 296-19-82

+38 (044) 296-11-96

E-mail: info@golnit.com

www.golnit.ua



хірургічний
атравматичний
шовний матеріал

ГОЛНИТ®

Вироблено в Україні.