

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

# ПОЛІЕФІР (поліестер)

**Виробник:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛНИТ», Україна.

### Опис

Шовний матеріал ПОЛІЕФІР (поліестер) виробництва ГОЛНИТ – це плетений матеріал, з покриттям і без, що не розсмоктується, виготовлений із 100% поліетилентерефталату. Шовний матеріал зеленого, білого або чорного кольору.

### Дія

Проведені клінічні випробування ПОЛІЕФІРУ (поліестер) показали, що матеріал викликає мінімальну реакцію тканин. Шовний матеріал ПОЛІЕФІР (поліестер) має дуже високу міцність, біосумісність. Шовний матеріал ПОЛІЕФІР (поліестер) не руйнується під дією тканинних ферментів і його якість не погіршується у випадку інфекції.

### Застосування

Шовний матеріал ПОЛІЕФІР (поліестер), що не розсмоктується, застосовується для зшивання м'яких тканин і/чи для накладання лігатур, включаючи нейрохірургічні, офтальмологічні та серцево-судинні операції, а також для фіксації м'яких тканин на кісткових структурах.

### Попередження

Матеріал розроблений для одноразового використання. Повторно не стерилізувати. Повторна стерилізація матеріалу може призвести до втрати міцності нитки.

### Заходи безпеки

Як і в роботі з іншими матеріалами, треба уникати пошкоджень під час експлуатації. Уникайте стискання матеріалу чи контакту з гострими інструментами. Для безпеки (надійності) вузла, використовується стандартна хірургічна техніка в'язання, як це передбачено хірургічними умовами, та ґрунтуючись на досвіді хірурга. При зав'язуванні вузла, кінці ниток натягуються в протилежних напрямках з однаковою силою.

УВАГА: натяг не повинен проводитись голкою, затягуйте нитку, використовуючи пальці. Потрібно уникати ривків, які можуть пошкодити нитку чи відділити нитку від голки. Для створення надійного вузла, необхідно зтягнути нитку у відповідності до техніки в'язання стандартних хірургічних вузлів.

### Стерильність

Шовний матеріал ПОЛІЕФІР (поліестер) виробництва ГОЛНИТ випускається в подвійній стерильній упаковці. Не використовувати матеріал, якщо упаковка має пошкодження. В запечатаному вигляді продукт залишається стерильним відповідно до терміну придатності, вказаному на упаковці.

### Побічна дія

Не виявлена.

### Правила зберігання

Шовний матеріал ПОЛІЕФІР (поліестер) повинен зберігатися при температурі від 5°C до 40°C та вологості не більше 80%, в повітрі не повинно міститися ніяких агресивних домішок.

|                                                                                     |                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Use By                                      | Використати до                           |
|    | Manufacture Date                            | Дата виготовлення                        |
|    | Do Not Reuse                                | Не використовувати повторно              |
|    | Sterilized with ethylene oxide              | Стерилізовано окисом етилену             |
|    | Temperature limitation                      | Температура зберігання                   |
|    | Caution                                     | Обережно                                 |
|    | Batch Code                                  | Лот продукції                            |
|    | Product Code                                | Код продукції                            |
|    | Manufacturer                                | Виробник                                 |
|    | Reverse Cutting Needle                      | Зворотньо-ріжуча голка                   |
|    | Cutting Needle                              | Ріжуча голка                             |
|  | Spatula Needle                              | Шпательна голка                          |
|  | Taper Point Needle                          | Колюча голка                             |
|  | Tapercut Needle                             | Колюче-ріжуча голка                      |
|  | Tapercut needle with a sharpening "diamond" | Колюче-ріжуча голка з заточкою «даймонд» |



**ТОВ «Голнит»**

Харківське шосе, 48, 02160, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 296-19-82

+38 (044) 296-11-96

E-mail: [info@golnit.com](mailto:info@golnit.com)

**[www.golnit.ua](http://www.golnit.ua)**



хірургічний  
атравматичний  
шовний матеріал

**ГОЛНИТ®**

Вироблено в Україні.