



хірургічний
атравматичний
шовний матеріал

ГОЛНИТ®

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Монофаст (Мепфіл- Мо)

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛНИТ», Україна.

Опис

Шовний матеріал МОНОФАСТ (Мепфіл - Мо) виробництва ГОЛНИТ – це монофіламентний матеріал, що розсмоктується, виготовлений із сополімера гліколіду та епсилон -капролактону. Шовний матеріал є високопластичним з гладкою поверхнею, золотистого або фіолетового кольору. Часто виступає як синтетичний замітник кетгуту.

Дія

Проведені клінічні випробування МОНОФАСТУ (Мепфіл- Мо) показали, що матеріал викликає мінімальну реакцію тканин. Шовний матеріал МОНОФАСТ (Мепфіл- Мо) зберігає 60-70% своєї початкової міцності за 7 днів після імплантації та 30-40% міцності за 14 днів . Повна абсорбція настає після 90-120 днів. Шовний матеріал МОНОФАСТ (Мепфіл- Мо) не руйнується під дією тканинних ферментів і його якість не погіршується у випадку інфекції.

Застосування

Шовний матеріал МОНОФАСТ (Мепфіл - Мо), що розсмоктується, призначений для з'єднання м'яких тканин в місцях, де необхідне використання шовного матеріалу, який розсмоктується.

Протипоказання

Оскільки даний шовний матеріал розсмоктується, він не призначений для використання у тих випадках, якщо необхідно довготривале збереження міцності на розтягнення.

Попередження

Безпечність та ефективність матеріалу при використанні в офтальмології, мікрохірургії і кардіохірургії не доведена. Матеріал розроблений для одноразового використання. Повторно не стерилізувати. Повторна стерилізація матеріалу може призвести до втрати міцності нитки.

Заходи безпеки

Як і в роботі з іншими матеріалами, треба уникати пошкоджень під час експлуатації. Уникайте стискання матеріалу чи контакту з гострими інструментами.

Для безпеки (надійності) вузла, використовується стандартна хірургічна техніка в'язання, як це передбачено хірургічними умовами, та ґрунтуючись на досвіді хірурга.

При зав'язуванні вузла, кінці ниток натягуються в протилежних напрямках з однаковою силою.















УВАГА: натяг не повинен проводитись голкою, затягуйте нитку, використовуючи пальці. Потрібно уникати ривків, які можуть пошкодити нитку чи відділити нитку від голки. Нерівномірний натяг нитки може призвести до створення небезпечного вузла. Для створення надійного вузла, необхідно затягнути нитку у відповідності до техніки в'язання стандартних хірургічних вузлів.

Стерильність

Шовний матеріал МОНОФАСТ (Мепфіл - Мо) виробництва ГОЛНИТ випускається в подвійній стерильній упаковці. Не використовувати матеріал, якщо упаковка має пошкодження. В запечатанному вигляді продукт залишається стерильним протягом терміну придатності, вказаному на упаковці.

Побічна дія

Не виявлена.

	Use By	Використати до
	Manufacture Date	Дата виготовлення
	Do Not Reuse	Не використовувати повторно
	Sterilized with ethylene oxide	Стерилізовано окисом етилену
	Caution	Обережно
	Batch Code	Лот продукції
	Product Code	Код продукції
	Manufacturer	Виробник
	Reverse Cutting Needle	Зворотньо-ріжуча голка
	Cutting Needle	Ріжуча голка
	Spatula Needle	Шпательна голка
	Taper Point Needle	Колюча голка
	Tapercut Needle	Колюче-ріжуча голка
	Tapercut needle with a sharpening "diamond"	Колюче-ріжуча голка з заточкою «даймонд»



ТОВ «Голнит»

Харківське шосе, 48, 02160, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 296-19-82

+38 (044) 296-11-96

E-mail: info@golnit.com

www.golnit.ua



хірургічний
отравматичний
шовний матеріал

ГОЛНИТ®

Вироблено в Україні.